


AMPLIFICADOR DE SONIDOS

LEXMANN[®]

ZP 201

MANUAL DE INSTRUCCIONES

DIAGRAMA

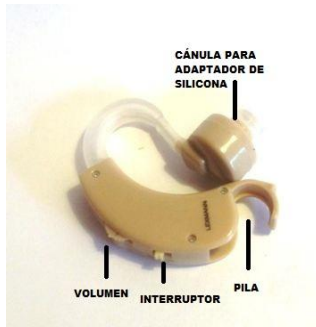

USO

- 1 Introducir en la clavija la cánula de silicona que mejor se adapte a su oído
- 2 Insertar la pila
- 3 Encender en posición ON
- 4 Introducir en el oído y ajustar el volumen.

INDICACIONES

Comience a probar con el volumen más bajo y súbalo gradualmente hasta que el sonido sea el adecuado a sus necesidades. Si acerca la mano puede generar pitidos de interferencia. Si no utiliza, apáguelo, poner en posición **OFF** y la pila le durará más tiempo.

IMPORTANTE

No usar en el agua (ducha, etc.)
Si no lo usa por un período largo, retire la pila.
Mantener en un ambiente seco.
Se recomienda utilizar durante cortos períodos de tiempo, usar solo cuando necesite amplificar sonidos.
No compensa pérdidas auditivas.
Depositar las pilas usadas en contenedores de pilas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Salida máxima 133 ± 5 dB
Ganancia >50 dB
Distorsión armónica <6%
Frecuencia 400 -3900 Hz
Ruidos de entrada <30 dB
Pilas AG13 o A675 1,5 v
Consumo < 4 mA