

AMPLIFICADOR DE SONIDOS

**LEXMANN**<sup>®</sup>

ZP 136

MANUAL DE INSTRUCCIONES

## DIAGRAMA



## USO

- 1 Introducir en la clavija la cánula de silicona que mejor se adapte a su oído.
- 2 Insertar la pila
- 3 Encender en posición **I**
- 4 Introducir en el oído y ajustar el volumen.

## INDICACIONES

Comience a probar con el volumen más bajo y súbalo gradualmente hasta que el sonido sea el adecuado a sus necesidades. Si acerca la mano puede generar pitidos de interferencia. Si no lo usa, apáguelo, poner en posición **O** y la pila le durará más tiempo.

## IMPORTANTE

No usar en el agua (ducha, piscina etc.)  
Si no lo usa por un período largo, retire la pila.  
Mantener en un ambiente seco.  
Se recomienda utilizar durante cortos períodos de tiempo, usar solo cuando necesite amplificar sonidos  
No compensa pérdidas auditivas.  
Depositar las pilas usadas en contenedores de pilas



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Salida máxima  $133 \pm 5$  dB  
Ganancia >50 dB  
Distorsión armónica <6%  
Frecuencia 400 -3900 Hz  
Ruidos de entrada <30 dB  
Pilas AG5 – LR754 1,5 v  
Consumo < 4 mA