

AMPLIFICADOR DE SONIDOS

LEXMANN[®]

ZR 109

MANUAL DE INSTRUCCIONES

DIAGRAMA



USO

1 Introducir en la clavija el adaptador de silicona que mejor se adapte a su oído

IMPORTANTE

El adaptador de silicona debe entrar muy ajustado para evitar pitidos de interferencia

2 Encender con el interruptor hacia arriba, la posición **N** es uso normal, posición **H** filtra sonidos de baja frecuencia

3 Introducir en el oído

INDICACIONES

Comience a probar con el volumen más bajo y súbalo gradualmente hasta que el sonido sea el adecuado a sus necesidades

Si acerca la mano puede generar pitidos de interferencia.

Cuando no lo use, apáguelo, poner interruptor hacia abajo, posición (OFF) y la batería le durará más tiempo.

RECARGA

1 Poner el interruptor hacia abajo, apagado (Off) e insertar el cable en el conector.

2 Conectar el cable al puerto USB del cargador

3 Conectar el cargador a la red eléctrica



4 Durante la carga la luz se pondrá **VERDE**, cargar mínimo 3 horas para una carga completa

En las 3 primeras cargas dejar que la batería se agote

Para la carga solo use el cargador incluido, no utilice un cargador distinto ya que puede dañar el aparato

IMPORTANTE

No usar en el agua (ducha, etc.)

Conservar en lugar seco

Se recomienda utilizar durante cortos períodos de tiempo, usar solo cuando necesite amplificar sonidos

No compensa pérdidas auditivas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Salida máxima 135 ± 5 dB

Ganancia >38 dB ± 5 dB

Distorsión armónica $<5\%$

Frecuencia 300-4000 Hz

Ruidos de entrada <230 dB

Batería Litio 55 mAh

Consumo <4 mA