


AMPLIFICADOR DE SONIDOS

**LEXMANN**<sup>®</sup>

XP100

MANUAL DE INSTRUCCIONES

## DIAGRAMA

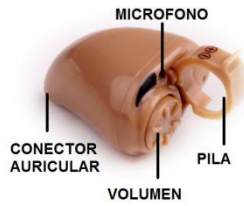

## USO

- 1 Introducir en el aparato la cánula de silicona que mejor se adapte a su oído
- 2 Insertar la pila
- 3 Al cerrar el compartimento de la pila, el aparato se enciende.
- 4 Introducir en el oído y ajustar el volumen.

## INDICACIONES

Comience a probar con el volumen más bajo y súbalo gradualmente hasta que el sonido sea el adecuado a sus necesidades.

Si acerca la mano puede generar pitidos de interferencia.

Cuando no lo use, apáguelo abriendo el compartimento de la pila y así esta le durará más tiempo.

## IMPORTANTE

No usar en el agua (ducha, piscina etc.)

Si no lo usa por un período largo, quite la pila.

Mantener en un ambiente seco.

Se recomienda utilizar durante cortos períodos de tiempo, usar solo cuando necesite amplificar sonidos

No compensa pérdidas auditivas.

Depositar las pilas usadas en contenedores de pilas



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Salida máxima  $120 \pm 5$  dB

Ganancia  $>30$  dB

Distorsión armónica  $<10\%$


Frecuencia 300-4000 Hz

Ruidos de entrada  $<40$  dB

Pilas AG3 o LR41 1,5 v

Consumo  $< 4$  mA

## GRAFICO DE GANANCIA SEGÚN VOLUMEN

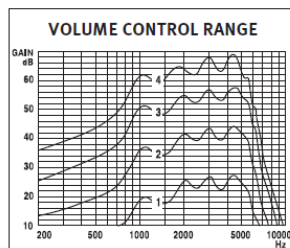

Input sound pressure level: 50 dB

