

# INSTRUCCIONES ZR125

## DIAGRAMA



## USO

- 1 Introduzca el adaptador de silicona que mejor se adapte a su oído en la clavija del aparato. Gire el altavoz a la posición del oído



### MUY IMPORTANTE

**El adaptador de silicona debe entrar muy ajustado para evitar pitidos de interferencia**

- 2 Encienda el aparato, interruptor hacia abajo, posición **N**.
- 3 Introduzca el aparato en el oído

## INDICACIONES

Cuando use el aparato, comience a probar con el volumen más bajo y súbalo gradualmente hasta que el sonido sea el adecuado. Si acerca la mano puede generar pitidos de interferencia. Cuando no use el aparato, apáguelo, posición **O** y la batería le durará más tiempo.

## FILTRO RUIDOS

Este modelo tiene **4** canales.  
Apretando la letra **M** cambia de canal.  
Elija el canal más adecuado de acuerdo a la situación ambiental

## CARGA

- 1 Poner el interruptor del aparato hacia arriba, apagado (**O**) e insertar el cable en el aparato.
- 2 Conecte el cable al puerto USB del cargador
- 3 Conecte el cargador a la red eléctrica



- 4 Durante la carga la luz se pondrá **VERDE**, finalizada se apagará.  
Cargar mínimo 6 horas para una carga completa  
La batería cargada suele durar aproximadamente 1 a 2 días  
En las 3 primeras cargas dejar que la batería se agote completamente.

### IMPORTANTE

**No mojar ni lavar el aparato**  
**Conservar en lugar seco y a temperatura entre 10 y 40°**