

INSTRUCCIONES ZR202

DIAGRAMA



USO

1.- Introduzca el adaptador de silicona que mejor se adapte a su oído en la clavija del aparato

MUY IMPORTANTE

El adaptador de silicona debe entrar muy ajustado para evitar pitidos de interferencia

2.- Encienda el aparato, interruptor al centro posición **L**, para uso normal, amplifica todas las frecuencias. Arriba en posición **H** filtra ruidos de baja frecuencia

3.- Introduzca el aparato en el oído

INDICACIONES

Cuando use el aparato, comience a probar con el volumen más bajo y súbalo gradualmente hasta que el sonido sea el adecuado. Si acerca la mano puede generar pitidos de interferencia.

Cuando no lo use, apáguelo, poner interruptor hacia abajo (OFF) y la batería le durará más tiempo.

AJUSTE TUBO



Girar el tubo para que la silicona quede en posición y se pueda introducir en el canal auditivo

CARGA

1 Poner el interruptor hacia abajo, apagado (Off) e insertar el cable en el aparato.

2 Conecte el cable al puerto USB del cargador

3 Conecte el cargador a la red eléctrica



4 Durante la carga la luz se pondrá **AZUL** intermitente, finalizada quedara fija, cargar mínimo 6 horas para una carga completa

La batería cargada suele durar aproximadamente 1 a 2 días

En las 3 primeras cargas dejar que la batería se agote completamente

IMPORTANTE

No mojar ni lavar el aparato

Conservar en lugar seco y a temperatura entre 10 y 40°