

MODELO ZR 123

DIAGRAMA



INDICACIONES

Comience a probar con el volumen más bajo y súbalo gradualmente hasta que el sonido sea el adecuado a sus necesidades. Si acerca la mano puede generar pitidos de interferencia. Cuando no lo use, apáguelo poniendo el interruptor en posición **OFF** y así le durará más tiempo la carga.

USO

1 Introducir en la clavija del tubo la cánula de silicona que mejor se adapte a su oído
IMPORTANTE la silicona debe entrar ajustada a su oído para evitar interferencias

2 Ajustar cortando el tubo e introducirlo en el gancho



3 COMO CARGAR



Poner el aparato en el cargador
El aparato debe estar en posición OFF
Se encenderá la luz roja (parpadeando)

Cuando esté cargado se encenderá la luz verde, aproximadamente 4-8 horas de carga.

4 Para su uso, encender el aparato poniendo el interruptor en posición **ON**

IMPORTANTE

No usar en el agua (ducha, etc.)
Mantener en un ambiente seco.
Se recomienda utilizar durante cortos períodos de tiempo, usar solo cuando necesite amplificar sonidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Salida máxima 130 ± 5 dB
Ganancia >53 dB
Distorsión armónica $<8\%$
Frecuencia 400 -3500 Hz
Ruidos de entrada <32 dB
Batería Ni-MH
Consumo <4 mA