

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE USO Y MANTENIMIENTO

Posición del aparato en el oído

El aparato izquierdo lleva el número de serie en color **AZUL**, el derecho en color **ROJO**

Es importante la posición ya que el aparato sigue la forma del canal auditivo.

Al introducirlo en el oído debe quedar el **CONTROL DE VOLUMEN** Arriba y la **ANTENA EXTRACTORA** abajo.

La silicona debe entrar muy ajustada al oído para evitar interferencias.



LIMPIEZA

Este modelo al ir introducido en el canal auditivo es muy propenso a acumular cera.

Es importante que con una aguja o alfiler limpie el orificio (Boquilla) de entrada.

Es pequeño y difícil de ver a simple vista.




QUITAR LA SILICONA

LIMPIAR LA SILICONA

LIMPIAR LA BOQUILLA

CAMBIO DE BOQUILLA

Si fuese necesario cambiar la boquilla por exceso de cera

- 1.- Introduzca el lado **A (con rosca)** de la herramienta naranja, atornillando en el sentido del reloj  en la boquilla del aparato, para extraerla.
- 2.- Introduzca el lado **B (liso)** de la herramienta en la nueva boquilla
- 3.- Coloque la nueva boquilla en el aparato

